

نحوه ی تنظیم پارامترهای دستگاه کیوسونچ

فاصله بین جلسات (روز)	تعداد جلسات	Frequency (hz)	Power (mj)	محل کار
60-30	3-1	5-3	800-600	تاتو ابرو، خط چشم و لب و نقاط حساس
30-15	3-2	5-3	1000-800	لکه های کهنسالی
60-45	7-3	6-4	1500-1000	لکه و خال مادرزادی
14-7	10-6	8-5	1500-1000	کربن تراپی
60-30	5-3	6-4	1200-1000	تاتو بادی

توجه داشته باشید:

سری هندپیس 5 سانت از بدن فاصله داشته باشد

آب دستگاه پر باشد و هنگام جا به جایی حتما آب دستگاه خالی شود هر ماه یکبار آب دستگاه عوض شود

تمام تنظیمات فوق بر اساس اعلام کارخانه می باشد ولی بصورت تجربی به آستانه ی تحمل مراجعه کننده بستگی دارد و قابل کم کردن از میزان فوق می باشد

به علت ریسک بالای این دستگاه خواهشمندیم تا از توان های کم استفاده و به مرور در جلسات بعد توان اضافه شود